

Membrane CopiOs Extend®

La synergie de l'espace et du temps

Maintien de l'espace

- Conçue pour s'adapter au défaut avec suffisamment d'intégrité structurelle pour la création de l'espace

Capacité de résorption étendue

- Prévue pour durer près de 38 semaines¹ afin de permettre la mise en place de l'implant en laissant suffisamment de temps pour la régénération

Fonctionne même lorsque la fermeture primaire n'a pas été réalisée

- Aucun signe d'inflammation ou d'infection dans les cas où la fermeture primaire n'a pas été réalisée^{2,3}



Membrane collagène de longue durée

Fonctionne même lorsque la fermeture primaire n'a pas été réalisée

L'expérience clinique a montré que la membrane CopiOs Extend n'engendre aucun signe d'inflammation ou d'infection dans les cas où la fermeture primaire n'a pas été réalisée. Le site exposé cicatrise par le recouvrement des tissus mous en quelques semaines alors que la membrane conserve sa fonction de barrière.^{2,3}

Indications

En tant que matériau résorbable, la membrane CopiOs Extend est destinée à un usage dans les procédures de chirurgie buccale :

- Augmentation autour d'implants placés immédiatement ou de manière retardée dans une alvéole après extraction
- Augmentation crestale localisée pour implantation ultérieure
- Reconstruction de la crête pour traitement prothétique
- Obturation des défauts osseux
- Régénération osseuse guidée pour les déhiscences osseuses
- Procédures de régénération tissulaire guidée pour les défauts parodontaux



Regardez-y de plus près



Figure A Image clinique montrant l'étendue de la perte osseuse sur la zone palatine.



Figure B La membrane CopiOs Extend a été posée sur le greffon et fixée sous le lambeau.



Figure C Lambeau suturé au dessus de la membrane.



Figure D Deux mois post-opératoire.

Clichés cliniques ©2013 Dr El Chaar†
Tous droits réservés. Les résultats individuels peuvent varier.

Informations produit

Numéro de catalogue	Description
0190Z	Membrane CopiOs Extend, 15 x 20 mm
0191Z	Membrane CopiOs Extend, 20 x 30 mm
0192Z	Membrane CopiOs Extend, 30 x 40 mm

1 Données enregistrées auprès de Collagen Matrix, Inc.

2 Cas cliniques enregistrés auprès de Zimmer Dental, Inc.

3 Cas cliniques enregistrés auprès de Collagen Matrix, Inc.

† Le Dr El Chaar a conclu un partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental pour la tenue de conférences, la fourniture de conseils et d'autres services.

Contactez-nous au +33(0)1- 45 12 35 35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tél. : +1-561-776-6700
Fax : +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
2 place Gustave Eiffel, BP 40237
94528 RUNGIS Cedex
France
Tél.: +33 1 45 12 35 35
Fax: +33 1 45 60 04 88

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., distribués et commercialisés par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution et de la commercialisation, par ses partenaires de commercialisation). La membrane CopiOs Extend est fabriquée par Collagen Matrix, Inc. (CMI). Collagen Matrix, Inc. n'est pas une filiale de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. L'autorisation et la disponibilité des produits peuvent être limitées dans certains pays ou certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et ne représente ni un avis médical, ni des recommandations. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental. ZB0021FR REV B 04/18 ©2018 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

