

# BioMend<sup>®</sup> & BioMend<sup>®</sup> Extend<sup>™</sup>



30 mm x 40 mm

20 mm x 30 mm

15 mm x 20 mm



## MEMBRANE DI COLLAGENE RIASSORBIBILI

### **1** RIASSORBIBILE<sup>1</sup>

Elimina la necessità di una seconda fase chirurgica per la rimozione della membrana. Progettata per ridurre il trauma della ferita e i tempi chirurgici alla poltrona



La Membrana BioMend viene preparata per l'inserimento nella cavità del seno mascellare.

### **2** Barriera alla crescita epiteliale

Funge da barriera per prevenire la migrazione delle cellule epiteliali e per consentire il passaggio dei nutrienti essenziali.<sup>1</sup>

### **3** Mantenimento dello spazio

Un'impalcatura rigida per la rigenerazione tissutale nelle procedure di rigenerazione guidata dei tessuti (GTR) e di rigenerazione ossea guidata (GBR)



**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.<sup>®</sup>

# BioMend® & BioMend® Extend™

LA MEMBRANA RIASSORBIBILE SUFFICIENTEMENTE RIGIDA DA CREARE E MANTENERE LO SPAZIO

## OTTIMA MANEGGEVOLEZZA

- Resistente alle lacerazioni, suturabile, duttile
- Facile da maneggiare anche quando è idratata
- Sufficientemente rigida da creare e mantenere lo spazio

## FUNZIONE BARRIERA VERSATILE

- Indicata per l'uso nelle procedure di rigenerazione tissutale e rigenerazione ossea guidate
- La membrana BioMend è progettata per riassorbirsi in circa 8 settimane<sup>1</sup>
- La membrana BioMend Extend è progettata per riassorbirsi in circa 18 settimane<sup>1</sup>



1 Difetto esposto della parete vestibolare in corrispondenza del primo molare.



2 La membrana viene preparata per l'inserimento.



3 La membrana viene tagliata per l'inserimento.



4 Membrana inserita nell'alveolo.



5 Suture inserite per la chiusura del sito chirurgico.



6 Risultato estetico finale.

Immagini cliniche del Dr. Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, NC, USA, ©2013. Tutti i diritti riservati. I risultati individuali possono variare.

## Informazioni per gli ordini:

Codice articolo	Descrizione	Codice articolo	Descrizione
0103Z	Membrana BioMend, 15 x 20 mm	0140Z	Membrana BioMend Extend, 15 x 20 mm
0105Z	Membrana BioMend, 20 x 30 mm	0141Z	Membrana BioMend Extend, 20 x 30 mm
0107Z	Membrana BioMend, 30 x 40 mm	0142Z	Membrana BioMend Extend, 30 x 40 mm

<sup>1</sup> Dati archiviati presso Collagen Matrix, Inc.

Per informazioni: +39 0438 37681 o [zimmerdental.it](http://zimmerdental.it)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Telefono: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl  
Viale Italia n. 205/D  
31015 Conegliano (TV)  
Tel.: +39 0438 37681  
Fax: +39 0438 553181  
[zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com](mailto:zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com)

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuite e commercializzate da Zimmer Biomet Dental (e, per quanto riguarda la distribuzione e il marketing, i suoi Marketing Partner Autorizzati). In determinati paesi, le membrane BioMend e BioMend Extend sono fabbricate da Collagen Matrix, Inc. Per ulteriori informazioni, consultare le indicazioni, le etichette o le istruzioni per l'uso allegate a ciascun prodotto. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi/regioni. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB0056IT REV A 08/17 ©2017 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

