



Membrana pericardica CopiOs®

Informazioni sul prodotto



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.

Membrana pericardica CopiOs

Perché è necessario l'aumento osseo?

L'aumento osseo viene spesso utilizzato per preparare un sito per impianti dentali necessari per sostituire uno o più denti mancanti. In un'area in cui sono stati persi i denti, l'osso si restringe o si riassorbe naturalmente nel tempo, sia in altezza che in larghezza. Di conseguenza, è necessario innestare un nuovo osso per creare un sito sicuro per posizionare gli impianti e ottenere risultati estetici. L'innesto osseo può anche essere usato per salvare i denti che hanno subito una perdita di tessuto osseo.¹

In cosa consiste l'aumento osseo?

Il sito chirurgico viene anestetizzato localmente. Nella regione che richiede la ricostruzione ossea, viene creata una piccola apertura. Nel sito ricevente aperto viene posizionato un materiale per la sostituzione ossea. Il materiale per la sostituzione ossea viene quindi stabilizzato con una copertura protettiva, come la membrana pericardica CopiOs, e richiuso per tutta la durata della fase di guarigione.¹

Cosa sono le membrane pericardiche CopiOs?

Le membrane pericardiche CopiOs sono membrane protettive costituite da tessuto naturale prodotto da pericardio bovino. La membrana è progettata per essere completamente assorbita dal corpo umano e per essere sostituita dai tessuti naturali del paziente.²

Quali tipi di membrane esistono?

Le membrane possono essere riassorbibili o non riassorbibili. Le membrane riassorbibili possono essere assorbite naturalmente dall'organismo dopo un certo periodo di tempo. La membrana pericardica CopiOs è una membrana riassorbibile e non richiede un ulteriore intervento chirurgico per la rimozione.



Cosa accade alla membrana pericardica CopiOs nell'organismo?

La membrana pericardica CopiOs viene assorbita naturalmente dal corpo.²

Cosa la rende sicura?

La membrana pericardica CopiOs è un tessuto naturale trattato con il processo di sterilizzazione brevettato Tutoplast® in conformità a rigorose procedure che ne garantiscono l'uniformità e qualità. Questo processo garantisce standard elevati di sicurezza e qualità. Il risultato è una membrana sicura e biocompatibile. Tuttavia, non è possibile escludere con assoluta certezza la trasmissione di malattie mediante materiali biologici.

Zimmer Biomet Dental si impegna a offrire prodotti che rispettano i più elevati standard di qualità e sicurezza. Per questo motivo, il produttore viene esaminato e approvato da un organismo notificato indipendente in base a processi standard. Le membrane pericardiche CopiOs sono dispositivi medici conformi alle normative europee per la certificazione CE.²

Vi sono effetti collaterali causati dalle membrane pericardiche CopiOs?

Sebbene non siano noti effetti collaterali specifici, i pazienti possono manifestare reazioni locali alla membrana pericardica CopiOs.² Non sono note interazioni con le membrane pericardiche CopiOs.²

Cosa deve essere preso in considerazione?

La membrana pericardica CopiOs non deve essere applicata nei seguenti casi:²

- Impersensibilità nota al collagene bovino
- Disturbi o malattie che comportano un aumento inaccettabile del rischio postoperatorio
- Disturbi o condizioni che inibiscono la guarigione a causa di vascolarizzazione insufficiente, come cardiopatie, diabete o fumo
- Infezione attiva o latente nell'area dell'innesto
- Esclusivo contatto con superfici che impediscono la migrazione cellulare nella membrana o che non offrono una capillarizzazione sufficiente

L'uso della membrana pericardica CopiOs per coprire i siti con innesti può rappresentare la soluzione migliore nonostante la presenza di alcune delle circostanze sopra elencate.

Bibliografia

1. Elgali I, Omar O, Dahlin C, Thomsen P. Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited. Eur J Oral Sci (2017) 125:315-337.
2. Istruzioni per l'uso della membrana pericardica CopiOs.

Sebbene la presente brochure sia stata progettata per rispondere ad alcune delle domande frequenti relative alla membrana pericardica CopiOS, l'uso del prodotto in determinate indicazioni può essere limitato da fattori individuali. Per ulteriori informazioni, leggere le istruzioni per l'uso.



Per informazioni: +39-0438-37681 o
zimmerbiometdental.it

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più società che si occupano di cure dentali di Zimmer Biomet Holdings, Inc e sono commercializzati da Zimmer Biomet Dental e dai suoi partner commerciali autorizzati. La membrana pericardica CopiOs è prodotta da Tutogen Medical GmbH. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi/regioni. Questo materiale è destinato esclusivamente agli specialisti e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental.
ZB0646IT REV A 09/20 ©2020 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

