

Linee guida raccomandate per i profilatori ossei

Descrizione del prodotto

I profilatori ossei dentali Zimmer Biomet vengono utilizzati per facilitare la rimozione dell'osso intorno alla parte coronale dell'impianto, consentendo il posizionamento corretto di abutment di guarigione, componenti protesiche, cappette per impronta e restauri finali. Questo passaggio può essere impiegato in un protocollo chirurgico a uno o a due stadi. È particolarmente utile per il posizionamento di impianti subcrestali, ma può essere utilizzato in impianti selezionati in posizione crestale, se necessario.

Ogni profilatore osseo presenta un design di connessione ISO-Latch e può essere utilizzato con:

- Un manipolo dentistico per uso motorizzato
- Adattatore standard ISO 1797 per chiave a cricchetto a bassa coppia di serraggio [Articolo #: C9980] per facilitare l'uso manuale



Considerazioni importanti

- I profilatori ossei Zimmer Biomet Dental sono progettati per l'uso con i seguenti impianti dentali: Certain®, External Hex, Tapered Screw-Vent® (TSV®)/Trabecular Metal™ ed Eztetic®.
- I profilatori ossei sono forniti non sterili. I profilatori ossei sono riutilizzabili fino a 15 volte e devono essere sottoposti a pulizia e sterilizzazione prima di ogni utilizzo. Per le procedure raccomandate di pulizia e sterilizzazione dei profilatori ossei, fare riferimento a **Pulizia e sterilizzazione di kit e strumenti Biomet 3i (P-ZBDINSTRP) disponibile all'indirizzo <http://ifu.biomet3i.com/>**. Per la sterilizzazione, utilizzare i parametri per gli strumenti autonomi.
- I profilatori ossei devono essere ispezionati per verificarne l'usura prima di ogni utilizzo.
- La velocità consigliata per i profilatori ossei è pari o inferiore a 50 giri/minuto. Il superamento del numero di giri potrebbe danneggiare la superficie di appoggio dell'impianto o la struttura interna.
- Verificare che il profilatore osseo sia ingaggiato/trattenuto all'interno del meccanismo di bloccaggio del motore/manipolo del manipolo, al fine di prevenire l'ingestione o l'aspirazione accidentale.
- Il profilatore osseo deve essere completamente inserito nel sito implantare prima dell'uso. L'attivazione del profilatore osseo prima dell'inserimento può danneggiare la superficie di appoggio dell'impianto o la struttura interna.



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

Istruzioni per l'uso

1. Fissare il profilatore osseo allo strumento di posizionamento appropriato:
 - Uso motorizzato - manipoletto odontoiatrico.
 - Uso manuale - Adattatore per chiave a cricchetto a bassa coppia standard ISO 1797 Adattatore [C9980].

NOTA: se possibile, rimuovere l'osso in eccesso che potrebbe essere cresciuto sulla vite tappo e a sua volta rimuovere la vite tappo prima dell'uso del profilatore osseo.

2. Inserire il profilatore osseo nell'impianto posizionato. Assicurarsi che il perno guida del profilatore osseo sia allineato coassialmente all'impianto.



3. Quando il profilatore osseo è posizionato sul sito dell'impianto:
 - Uso motorizzato: avviare il manipoletto ruotando a una velocità pari o inferiore a 50 giri/min in senso orario.
 - Uso manuale: iniziare a ruotare il profilatore osseo in senso orario.

Applicare pressione nella direzione dell'impianto. Il profilatore osseo taglierà gradualmente l'osso in eccesso intorno all'aspetto coronale dell'impianto per consentire l'inserimento completo dei componenti protesici.

NOTA: Per un taglio ottimale assicurarsi che le lamelle taglienti siano libere da detriti residui. I detriti in eccesso infatti potrebbero compromettere le prestazioni del Profilatore Osseo, cosa che potrebbe comportare danni alla connessione dell'impianto.

4. Continuare la procedura di taglio fino a quando il profilatore osseo non rimuove più l'osso e l'osso in eccesso è stato sufficientemente ridotto per consentire il corretto posizionamento dei componenti protesici.

NOTA: assicurarsi che la piattaforma dell'impianto venga pulita dai residui ossei prima di posizionare il componente del restauro.

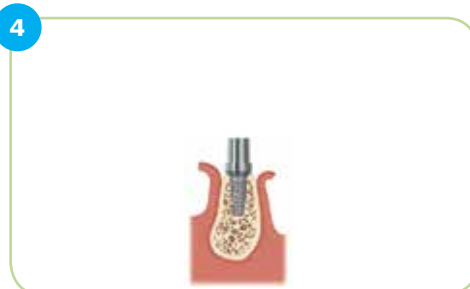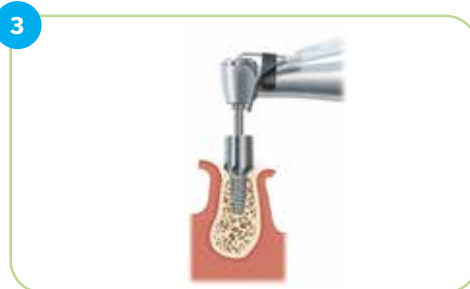

Per informazioni: +39 0438 37681 o zimmerbiometdental.it

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39 0438 37681
Fax: +39 0438 553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuite e commercializzate da Zimmer Biomet Dental e i suoi Marketing Partner autorizzati. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. Si prega di tenere presente che non tutti i prodotti e i materiali rigenerativi sono registrati o disponibili in tutti i paesi. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Il materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZBINST0022IT REV D 01/21 ©2021 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

