



Membrana de pericardio CopiOs®

Información sobre el producto



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.

Membrana de pericardio CopiOs

¿Por qué es necesario el aumento óseo?

El aumento óseo se utiliza con frecuencia para preparar una zona para los implantes dentales que se necesitan para sustituir una pieza o varias. El hueso de una zona en la que se han perdido piezas se contrae o reabsorbe de forma natural con el tiempo, tanto en altura como en anchura.

Como consecuencia, se debe injertar hueso nuevo para crear una zona segura en la que colocar los implantes y lograr resultados estéticos.

El injerto óseo también se puede utilizar para salvar las piezas que han experimentado una pérdida de hueso.¹

¿Qué implica el aumento óseo?

La zona quirúrgica se anestesia de forma local.

En la región que requiere reconstrucción ósea, se crea una pequeña abertura. Se coloca el material de sustitución ósea en el sitio receptor abierto.

A continuación, el material de sustitución ósea se estabiliza con una cubierta protectora, como la membrana de pericardio CopiOs, y se cierra durante la fase de cicatrización.¹

¿Qué son las membranas de pericardio CopiOs?

Las membranas de pericardio CopiOs son membranas de barrera protectoras, compuestas de tejido natural producido a partir de pericardio bovino (vaca).

La membrana está diseñada para que el cuerpo humano la absorba por completo y para que el tejido natural del paciente la sustituya.²

¿Qué tipos de membranas existen?

Las membranas pueden ser absorbibles o no absorbibles. Las membranas absorbibles pueden ser absorbidas naturalmente por el cuerpo después de un período de tiempo. La membrana de pericardio CopiOs es una membrana absorbible y no requiere cirugía adicional para su extracción.



¿Qué ocurre con la membrana de pericardio CopiOs en el cuerpo?

El cuerpo absorbe de forma natural la membrana de pericardio CopiOs.²

¿Cómo sé que es seguro?

La membrana de pericardio CopiOs es un tejido natural que se ha tratado mediante el proceso de esterilización patentado Tutoplast® de acuerdo con estrictos procedimientos de consistencia y calidad. Este proceso garantiza un alto nivel de seguridad y calidad. El resultado es una membrana segura y biocompatible. Sin embargo, la transmisión de enfermedades mediante materiales biológicos no se puede descartar con absoluta certeza.

Zimmer Biomet Dental se compromete a ofrecer productos con los mayores estándares de calidad y seguridad posibles. Por este motivo, un organismo notificado independiente revisa y aprueba al fabricante según los procesos estándar. Las membranas de pericardio CopiOs son dispositivos médicos que cumplen las normativas europeas de certificación CE.²

¿Hay efectos secundarios causados por las membranas de pericardio CopiOs?

Aunque no se conocen efectos secundarios específicos, los pacientes pueden experimentar reacciones locales a la membrana de pericardio CopiOs.² No se conocen interacciones con las membranas de pericardio CopiOs.²

¿Qué hay que tener en cuenta?

La membrana de pericardio CopiOs no debe aplicarse en ninguno de los siguientes casos:²

- Hipersensibilidad conocida al colágeno bovino.
- Cualquier dolencia o enfermedad que suponga un incremento inaceptable del riesgo posoperatorio.
- Trastornos o condiciones que inhiben la cicatrización debido a una vascularización deficiente, como enfermedades cardíacas, diabetes o tabaquismo.
- Infección activa o latente en el área del injerto.
- Contacto exclusivo con superficies que impiden la migración celular a la membrana o que no ofrecen suficiente capilarización.

El uso de la membrana de pericardio CopiOs para cubrir las zonas injertadas puede ser la mejor solución a pesar de la presencia de algunas de las circunstancias mencionadas anteriormente.

Bibliografía

1. Elgali I, Omar O, Dahlin C, Thomsen P. Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited. Eur J Oral Sci (2017) 125:315-337.
2. CopiOs Pericardium Membrane Instructions for use (IFU).

Tenga en cuenta que, aunque este folleto está diseñado para responder algunas de las preguntas más frecuentes sobre la membrana de pericardio CopiOS, los factores individuales pueden limitar el uso del producto en determinadas indicaciones. Lea las instrucciones de uso para obtener más información.



Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España)
y 800-827-836 (desde Portugal) o visite
zimmerbiometdental.es

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por al menos una de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc. y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comerciales autorizados. Tutogen Medical GmbH fabrica las membranas de pericardio CopiOs. Si desea más información sobre algún producto, consulte el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países o regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental.
ZB0646ES REV A 09/20 © 2020 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

